



## KOMPRESSEN : behandeling van borstkloven

**Omschrijving:** kompressen voor de behandeling van borstkloven, om pijn te verminderen en ter preventie van infecties – Medical Device Class II a

**Indicatie :**

- neutraliseert schadelijke micro-organismen
- voorkomt infecties
- verzacht onmiddellijk
- ondersteunt zeer snel het genezingsproces
- optimaliseert de huid rond de tepel
- ideaal voor de droge en gevoelige huid

**Eigenschappen:**

- 100% veilig (zelfs als de baby wat gel doorslikt) met een neutrale smaak en geur
- de gel op het kompres moet niet worden verwijderd bij het aanleggen van de baby
- plakt niet aan de huid
- aanbevolen door verloskundigen, lactatiekundigen en gynaecologen

**Samenstelling:**



- werking van het unieke **2QR Complex** (komt van de Aloe Vera plant)
  - \* polysachariden die zich binden aan de receptoren van slechte bacteriën om ze te vernietigen en goede bacteriën te herstellen (natuurlijke flora) = natuurlijk herstelproces
  - \* de bacterie is volledig omringd door deze ketens van polysachariden
    - de bacteriën kunnen zich niet langer hechten aan het epitheelweefsel van de huid
    - de huid is gezuiverd van slechte bacteriën
    - er kunnen geen infecties meer optreden
    - de tepel kan sneller herstellen


- niet gebaseerd op chemicaliën of giftige stoffen
- heeft geen negatieve invloed op de eigen lichaamscellen
- zonder bewaarmiddelen en kunstmatige parfums
- zonder alcohol

#### **Doelgroep :**

- bij tepelproblemen veroorzaakt door borstvoeding
- bij pijnlijke en gezwollen tepels van moeders die borstvoeding geven
- bij ontstoken gebieden en afschilfering van de tepels
- bij onvoldoende vocht in de huid van de tepel

#### **Gebruik:**

- na elke borstvoeding, met een min van 2x / dag zolang het huidweefsel van de tepel nog niet volledig is hersteld
- afhankelijk van persoonlijke behoefte
- 30 min is ideaal (min 10 min - max 60 minuten, aangezien de gel nadien in de huid is getrokken om daar haar werking te doen)

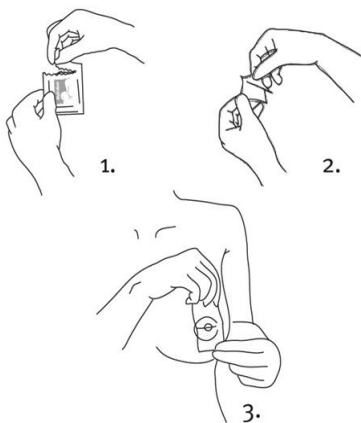

#### **Eénmalig gebruik**

- (1) open het zakje en haal het kompres eruit
- (2) plooi het kompres open
- (3) plaats het kompres op de tepel en druk zacht aan