



Cher client,

Merci pour votre achat !

Voici un petit guide où nous expliquons étape par étape comment transformer votre Stride Single en Stride Double.

Here we go!



Après avoir lavé et stérilisé les pièces, enfoncez la valve dans l'ouverture prévue sur le coussin mammaire. Attention : les pièces doivent être parfaitement sèches !



Faites passer le rebord du diaphragme sur la membrane du coussin mammaire et vérifiez que le diaphragme est bien fixé.



Formez le gobelet en emboîtant le coussin mammaire et la tête de gobelet, positionnez la flèche du coussin mammaire de façon à la centrer entre les deux repères d'alignement situés sur la tête de gobelet.



Enfoncez le bouchon dans le gobelet jusqu'à ce qu'il soit bien mis en place.



Prenez maintenant votre Stride Single et retirez le bouchon actuel. Remplacez ensuite le bouchon par le deuxième bouchon de votre connect kit.



Retirez la connexion actuelle de votre hub (bloc moteur) et connectez le hub au nouveau connect kit.

Maintenant vous pouvez vous reconnecter à votre App Elvie sans aucun problème et commencer à tirer le lait double.

Ready – Set – Pump!