



Beste klant,

Bedankt voor je aankoop!

Hier vind je een korte handleiding waarbij we stap voor stap uitleggen hoe je van je Stride Single een Stride Double maakt.

Here we go!

STAP 1



Na het wassen en steriliseren van de onderdelen, plaats je de valve (afsluiter) in de daarvoor voorziene opening op de borstschelp. Opgelet: de onderdelen moeten goed droog zijn!

STAP 2



Plaats het diafragma (membraan) over de rand van de borstschelp en controleer of het diafragma goed vastzit.

STAP 3



Maak de cup vast door de borstschelp en de voorkant van de cup samen te duwen, zorg ervoor dat de pijl op de borstschelp tussen de twee paslijnen op de voorkant van de cup staat.

STAP 4



Duw de dop van de connect kit in de cup tot je deze vast voelt klikken.

STAP 5



Neem nu je Stride Single en haal de huidige dop eruit. Daarna vervang je de dop door de tweede dop van je connect kit.

STAP 6



Haal de huidige aansluiting uit je hub (motorblok) en verbind de hub met de nieuwe connect kit.

Nu kan je zonder problemen opnieuw connecteren met je Elvie App en dubbel beginnen kolven.

Ready – Set – Pump!