

## Elvie Curve

### Tire-lait manuel portable

Elvie Curve est un tire-lait portable en silicone avec une succion variable permettant un tirage du lait en douceur et une collecte de la descente de lait pour un confort et une fonctionnalité ultimes. La manière la plus simple de tirer votre lait.

### Arguments de vente clés

#### Votre lait

Sans pièces fragiles, Elvie Curve est facile à utiliser : appuyez simplement sur la poche en silicone pour créer une succion naturelle et tirer jusqu'à 4 onces de lait à chaque fois.

#### Portable

S'insérant discrètement dans le soutien-gorge, Elvie Curve est portable afin que les mamans aient les mains libres et n'aient pas à se soucier du fait de le renverser lorsqu'elles nourrissent leur petit.

#### Confortable

Elvie Curve s'adapte à la forme des seins, avec du silicone doux au toucher et une valve pour contrôler le niveau de succion, assurant son confort même pour des seins gorgés de lait ainsi qu'un retrait facile.


#### Sûr et résistant

Elvie Curve convient au lave-vaisselle, ne contient pas de BPA, et est fabriqué en silicone alimentaire, parfait pour la maman et le bébé.

Les femmes qui allaitent peuvent utiliser Elvie Curve pour tirer leur lait tout en douceur dès que leurs seins semblent pleins ou lors de la descente du lait, lorsqu'elles allaitent ou tirent le lait de leur autre sein. Il s'adapte à la courbe de ses seins et se porte à l'intérieur du soutien-gorge, permettant à la maman de tirer son lait quasiment sans effort tout en ayant les mains libres et pouvant bouger en toute liberté.

### Fonctionnement

1. Insérez la poche dans le cadre
2. Placez votre mamelon au centre du trou pour mamelon, de telle sorte que vous vous sentez à l'aise et qu'il ne pousse pas contre l'intérieur de la poche
3. Appuyez sur la poche pour créer la succion. Si la succion générée est inconfortable, appuyez délicatement sur la valve pour l'ouvrir et libérer de la pression
4. Vérifiez que votre mamelon est encore centré
5. Mettez en place et couvrez Elvie Curve avec les outien-gorge d'allaitement. Gardez-le fermement appuyé contre le sein sans espace
6. Si la succion diminue au fil du temps, appuyez sur la poche pour maintenir la succion et continuer à faire couler le lait. Vous pouvez le faire à travers votre soutien-gorge. Gardez un œil sur le niveau de lait pour vous assurer qu'il ne déborde pas

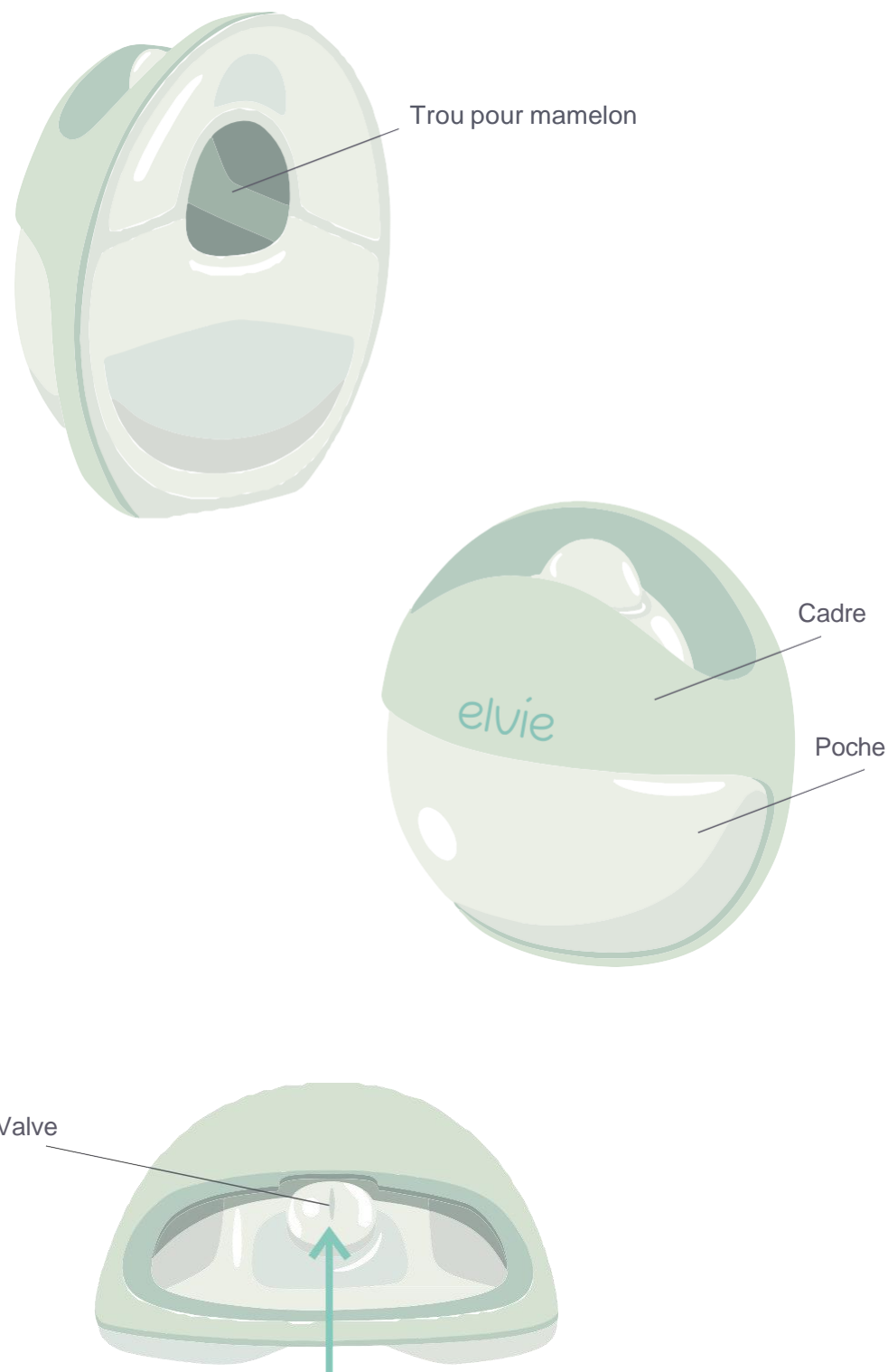

### Qu'est-ce que la « succion naturelle » ?

La succion naturelle décrit la pression créée par le fait de comprimer manuellement le tire-lait en silicone (une fois ou de manière répétée, selon votre préférence), à l'opposé de la succion oscillant en permanence avec un tire-lait manuel habituel ou un tire-lait électrique.

Contenu de la boîte	1 x cadre	1 x poche	Instructions d'utilisation (ML)
Elvie Curve			
Capacité de lait :	4 onces / 113,6 m		
Matériaux :	Silicone de qualité alimentaire et plastique sans BPA (PP)		
Couleur :	Blanc		
Taille :	EMEA : L 11,30 x l 10,6 x H 5,7 cm États-Unis : L 4,45 x l 4,17 x H 2,24 pc		
Poids :	EMEA : 0,12kg États-Unis : 0,26 livres		
Garantie:	90 jours		

Spécifications logistiques

Taille/poids de la boîte d’emballage :

	EMEA	États-Unis
1 Unit	L 12 x l 6,5 x H 13 cm 0,225 kg	L 4,72 x l 2,56 x H 5,12 pc 0,496 livres

Taille/poids de la boîte d’expédition :

	EMEA	États-Unis
Carton grand format 12 unités	L 39,8 x l 24,8 x H 14,2 cm 2,99 kg	L 15,67 x l 9,76 x H 5,59 pc 6,59 livres
1 440 unités 1 palette	L 130 x l 110 x H 156 cm 400 kg	L 51,18 x l 43,30 x H 61,41 pc 881,85 livres
Code EAN	5060442520547	
Pays d’origine	Chine	